

TRULOCK™

BONDING SYSTEM (LIQUIDE/GEL ETCHANT)



DESCRIPTION:

Trulock™ Etchant contient 37% d'acide phosphorique pour une utilisation sur dentine et email. La viscosité du Gel fournit un contrôle optimal afin qu'il ne coule pas sur les surfaces environnantes exposées. Un simple rinçage permet de nettoyer le produit.

Trulock™ Etchant est disponible en deux versions, liquide de couleur verte et gel de couleur bleue, permettant ainsi de bien distinguer le produit de la dent.

INDICATIONS D'UTILISATION:

Mordançage pour émail et dentine

CONTRE-INDICATIONS:

L'utilisation de Trulock™ Etchant est contre-indiquée sur les tissus mous tels que la muqueuse orale, la peau, les yeux et les tissus pulpaire dentaires.

MISES EN GARDE:

Trulock™ Etchant contient de l'acide phosphorique et peut provoquer des brûlures des tissus mous. Évitez tout contact avec les tissus mous buccaux, les yeux, la peau. En cas de contact avec des tissus mous, les yeux ou la peau, rincer immédiatement et abondamment à l'eau. En cas de contact avec les yeux, consulter immédiatement un médecin.

Bien fermer le bouchon après chaque usage.

PRECAUTIONS GENERALES:

1. Aux Etats-Unis, la loi fédérale n'autorise la vente de ce dispositif que sur ordonnance ou par un médecin.
2. Avant de débiter le traitement, lire les instructions et la FDS.
Utiliser conformément aux instructions.

EFFET INDESIRABLE:

L'exposition au produit peut aggraver des troubles préexistants respiratoires, de peau, des yeux, des poumons ou les allergies.

MODE D'EMPLOI:

1. Préparer la dent.
2. Isoler et sécher la dent soigneusement à l'air comprimé sans huile.
3. Oter le bouchon et placer l'embout sur la seringue Trulock™ Etchant. Appliquer Trulock™ Etchant durant 15 secondes pour préparer l'émail ou 10 secondes pour une application sur la dentine. Une légère agitation de l'Etchant au moment de l'application peut accentuer son effet.
4. Rincer abondamment à l'eau.
5. En cas d'utilisation d'un adhésif, il convient de se référer à la notice du fabricant pour savoir si la dent peut rester humide ou s'il convient de la sécher soigneusement.

STOCKAGE:

Stocker le produit entre 2°C/36°F to 27°C/80°F et le porter à température ambiante avant utilisation (22°C/72°F). Ne pas congeler. La date d'expiration est mentionnée sur l'emballage.

* Les embouts sont jetables et à usage unique.

 RMO, Inc 
650 West Colfax Avenue, RMO Europe

Denver, CO 80204 USA 300 Rue Geiler de Kaysersberg
www.rmortho.com 67400 Illkirch, France